




earsopen® HA-5S CL-1002

簡単操作ガイド

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本書と「取扱説明書」を
よくお読みの上、正しくお取り扱いください。
本書をお読みになったあとは、
いつでも見られるところに必ず保管してください。


箱の中身を確認する

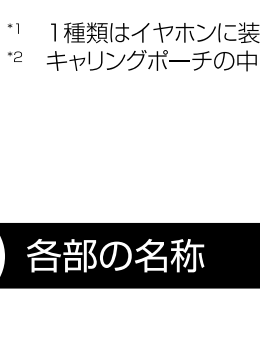

本体(1)



イヤホン(2)

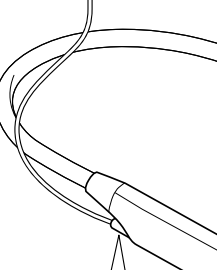


イヤークリップ(3種×2)*1,*2




クリップパッド(2種×2)*1,*2




充電用マイクロ
USBケーブル(1)*2

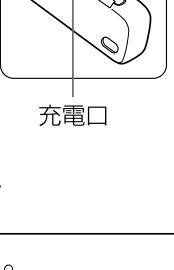

AC電源アダプター(1)*2

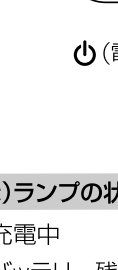

キャリングポーチ(1)

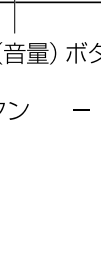


・取扱説明書/保証書(1)
・簡単操作ガイド(1)

*1 1種類はイヤホンに装着済みです。

*2 キャリングポーチの中に入っています。

各部の名称

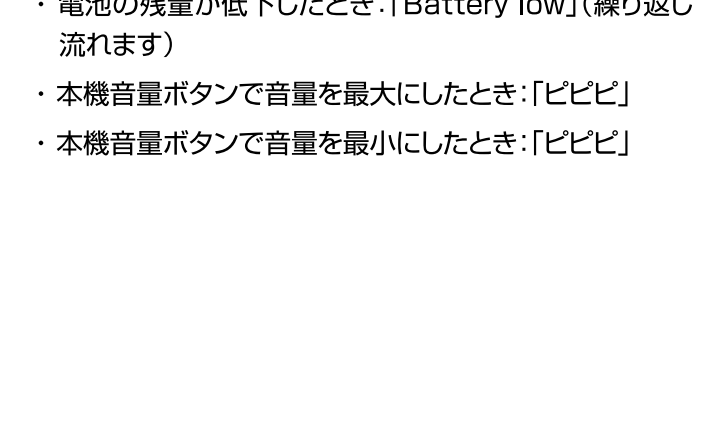

電源(赤)ランプの状態

- 【点灯】充電中
- 【点滅】バッテリー残量低下
- 【消灯】充電完了

操作音／音声ガイダンスについて


以下のとき、操作音、または英語の音声ガイダンスが流れます。

- ・電源を入れたとき:「ピッピッ」
- ・電源を切ったとき:「ピー」
- ・電池の残量が低下したとき:「Battery low」(繰り返し流れます)
- ・本機音量ボタンで音量を最大にしたとき:「ビビビ」
- ・本機音量ボタンで音量を最小にしたとき:「ビビビ」

充電する

はじめて本機を使用する場合は、まず充電してください。

- ① 本機の充電口のふたを開け、充電端子に付属のマイクロUSBケーブル(端子小)をつなぐ。
- ② AC電源アダプターとマイクロUSBケーブル(端子大)をつなぐ。
- ③ コンセントに接続し充電する。

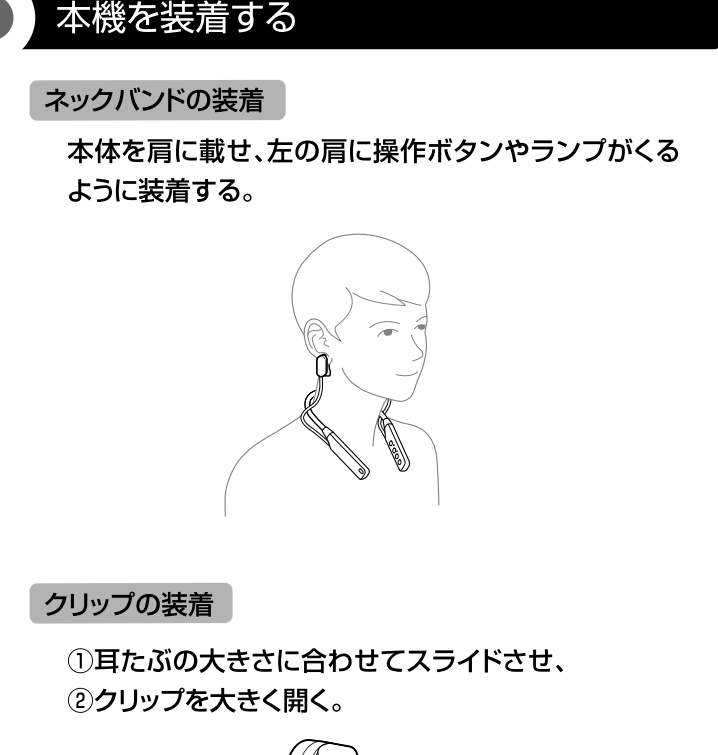


充電中: 点灯 (赤)
充電完了: 消灯
充電時間: 約1.5時間

【ご注意】

・充電完了後はマイクロUSBケーブルを外し、充電口のふたを閉めて、水やほこりが入らないようにしてください。

イヤホンの本機に取り付ける

イヤホンのR(右)を本体のR(右)に、イヤホンのL(左)を本体のL(左)に取り付ける。

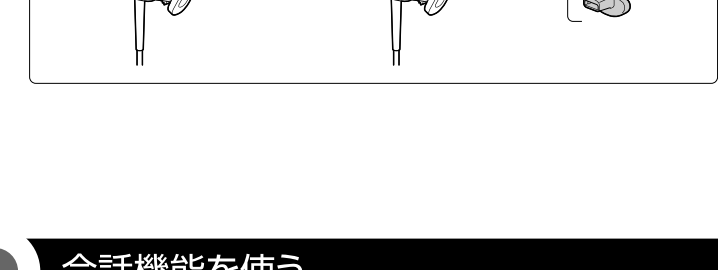

【ご注意】

・イヤホンの取り付け、取り外しは、本機の電源が切れている状態で行ってください。

本機を装着する

ネックバンドの装着

本体を肩に載せ、左の肩に操作ボタンやランプがくるように装着する。




クリップの装着


- ① 耳たぶの大きさに合わせてスライドさせ、
- ② クリップを大きく開く。



- ③ 耳の穴手前に引っ掛け、耳の軟骨に押し当てる。

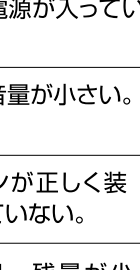

- ④ 耳たぶを耳裏側のクリップではさみ、しっかり留まる位置に調整する。

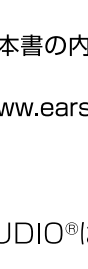

ポイント

しっかり装着できない場合は、イヤークリップやクリップパッドを付属のものとは交換してください。



会話機能を使う

- ① 電源(電源)ボタンを約1秒押しして電源を入れる。
「ピッピッ」という操作音が流れます。
- ② 本機のパワーボタンを押して、音量を調整する。



- ③ 本機の電源が入っている状態で電源(電源)ボタンを約2秒押しして電源を切る。
「ピー」という操作音が流れます。

【ご注意】

集音用マイクにイヤホン近づけると、「キーン」という音(ハウリング)が発生することがあります。その場合は、イヤホンを集音用マイクから離すか、音量を下げてください。

バッテリーの残量を確認する

バッテリー残量ボタンを押す。

青ランプ点灯...多
赤・青ランプ点灯...中
赤ランプ点灯...少

故障かなと思ったら

修理を依頼する前に、再度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはbocoお客様相談窓口へご連絡ください。

症状	原因	対応
音が出ない、音が途切れる。	本機の電源が入っていない。	本機の電源を入れてください。
	本機の音量が小さい。	本機の音量を上げてください。
音質が悪い。	イヤホンが正しく装着されていない。	「本機を装着する」を確認してください。
電源が入らない。	バッテリー残量が少ない。	本機を充電してください。
充電できない。	マイクロUSBケーブルが本機とつながっていない。	本機にマイクロUSBケーブルをしっかり接続してください。
異音がする。	音が大きすぎる。	音量を下げてください。

本機の仕様およびデザイン、本書の内容については改良のため予告なく変更する場合があります。
earsopen®の最新情報は、www.earsopen.jp をご覧ください。

商標について

・earsopen®、BONE AUDIO®は、BoCo株式会社の登録商標です。